

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH ĐIỆN BIÊN
KHOA XÉT NGHIỆM



QUY TRÌNH
DỰ TRÙ VÀ CẤP, PHÁT MÁU KHẨN CẤP

	Người biên soạn	Người xem xét	Người phê duyệt
Họ tên	Trần T.T. Mỹ Linh	Đặng Thị Hồng Ngọc	Ths.Bs. Phạm Văn Mẫn
Ký tên			
Thời gian	06.1.5./2019	07.1.5./2019	08.1.5./2019
Mã số: XNKT.036	Ngày ban hành: 08.1.5./2019		Lần sửa đổi:.....
Phiên bản: 01 Tài liệu nội bộ Bản số:.....			

MỤC LỤC

1. Mục đích.....	1
2. Phạm vi áp dụng :.....	1
3. Trách nhiệm.....	1
4. Thuật ngữ sử dụng.....	1
5. Nguyên lý	2
6. Trang thiết bị và vật tư	2
6.1. <i>Thiết bị:</i>	2
6.2. <i>Dụng cụ:</i>	2
6.3. <i>Bệnh phẩm</i>	2
6.4. <i>Sinh phẩm</i>	2
7. Các bước thực hiện.....	2
7.1. Tại khoa lâm sàng.....	2
7.2. Tại Khoa Xét nghiệm	3
8. Lưu ý – Cảnh báo	3
9. Lưu hồ sơ.....	3
10. Tài liệu tham khảo	4
PHÂN PHỐI.....	5





QUY TRÌNH DỰ TRÙ VÀ CẤP, PHÁT MÁU KHẨN CẤP

Mã số: XNKT.036

Ngày ban hành: .../.../201....

1. Mục đích

Quy trình này quy định thống nhất các thức thực hiện dự trữ và cấp phát máu, chế phẩm đối với các trường hợp được cho là khẩn cấp theo quy định của bệnh viện.

2. Phạm vi áp dụng :


- Thực hiện tại khoa Xét nghiệm và khoa Lâm sàng có người bệnh cần truyền máu khẩn cấp;
- Nhân viên khoa Xét nghiệm được phân công nhiệm vụ;
- Bác sĩ và điều dưỡng tại khoa Lâm sàng có người bệnh cần truyền máu khẩn cấp được phân công nhiệm vụ;
- Áp dụng trong các trường hợp cần truyền máu khẩn cấp, không kịp làm đầy đủ xét nghiệm theo quy định truyền máu , có sự đồng ý bằng văn bản của bác sĩ điều trị theo biểu mẫu được quy định trong quy trình này.

3. Trách nhiệm

- Tất cả các nhân viên khi thực hiện quy trình truyền máu có trách nhiệm và tuân thủ hướng dẫn này;
- Trưởng các khoa Xét nghiệm, Trung tâm Huyết học - Truyền máu, Trưởng khoa lâm sàng có trách nhiệm giám sát sự tuân thủ quy trình truyền máu khẩn cấp tại đơn vị mình;
- Tổ quản lý chất lượng khoa xét nghiệm đảm bảo việc thực hiện quy trình truyền máu khẩn cấp.

4. Thuật ngữ sử dụng

- KXN: Khoa Xét nghiệm;
- XN: Xét nghiệm;
- LS : Lâm sàng;
- BN : Bệnh nhân.

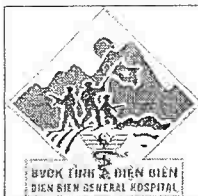

QUY TRÌNH DỰ TRÙ VÀ CẤP, PHÁT MÁU KHẨN CẤP

Mã số: XNKT.036

Ngày ban hành: .../.../201....

5. Nguyên lý

6. Trang thiết bị và vật tư

6.1. Thiết bị:

- Máy li tâm.

6.2. Dụng cụ:

- Pipet man.
- Ống nghiệm sạch, khô;
- Đầu côn.
- Bút ghi kính.

6.3. Bệnh phẩm

- Gồm 02 ống: 01 ống EDTA (nắp màu xanh dương) và 01 ống Heparin (nắp màu đen);
- Ống không bị vỡ hồng cầu, thông tin trùng khớp với phiếu chỉ định của BS lâm sàng.

6.4. Sinh phẩm

- Huyết thanh mẫu ABO;
- Huyết thanh mẫu Rh(D) IgG/IgM.

7. Các bước thực hiện

7.1. Tại khoa lâm sàng

- Căn cứ vào tình trạng của BN, Bác sĩ trực tiếp điều trị đưa ra quyết định truyền máu cụ thể;
- Liên hệ với khoa Xét nghiệm để kiểm tra kho máu:
 - + Trường hợp đã xác định được nhóm máu BN thì chỉ định truyền máu và chế phẩm theo quy định tại điều 44 Thông tư 26/2013/TT-BYT (phụ lục I);
 - + Trường hợp chưa xác định được nhóm máu người bệnh thì chỉ định theo quy định tại điều 45 thông tư 26/2013/TT- BYT (phụ lục I).



QUY TRÌNH DỰ TRÙ VÀ CẤP, PHÁT MÁU KHẨN CẤP

Mã số: XNKT.036

Ngày ban hành: .../.../201....

- BS lâm sàng nhập dữ liệu thông tin truyền máu: Thông tin hành chính BN, nhóm máu cần truyền (nếu có), số lượng cụ thể.. vào hệ thống quản lý thông tin bệnh viện. Đồng thời in phiếu chỉ định, ký, ghi đầy đủ họ tên;
- Ký xác nhận vào biên bản đồng ý truyền máu khẩn cấp (Phụ lục II). Bàn giao lại toàn bộ cho điều dưỡng lâm sàng.
- Điều dưỡng khoa lâm sàng trực tiếp chuyển lên phòng Truyền máu - khoa XN cùng với mẫu bệnh phẩm trong thời gian ngắn nhất;

7.2. Tại Khoa Xét nghiệm

- Nhân viên phòng truyền máu nhận mẫu máu và phiếu chỉ định truyền máu khẩn cấp, đối chiếu nhanh thông tin hành chính trên phiếu chỉ định truyền máu và mẫu bệnh phẩm;
- Lựa chọn đơn vị máu phù hợp về số lượng theo đúng chỉ định;
- Định lại nhóm máu ABO, Rh(D) bằng phương pháp Huyết thanh mẫu trong ống nghiệm cho đơn vị máu được lựa chọn;
- Sau khi xác nhận đơn vị được lựa chọn phù hợp, ghi chép lại thông tin hành chính của túi máu bao gồm: Số túi máu, số dây máu, ngày lấy. Đồng thời hoàn thành phiếu truyền máu theo quy định;
- Phát ngay cho điều dưỡng lâm sàng.

8. Lưu ý – Cảnh báo

- Chú ý kiểm tra đối chiếu thông tin hành chính của bệnh nhân với điều dưỡng lâm sàng để tránh xảy ra nhầm lẫn;
- Đảm bảo sinh phẩm được bảo quản ở nhiệt độ thích hợp;
- Ống nghiệm sạch khô, tránh sai sót trong quá trình định nhóm máu.

9. Lưu hồ sơ

STT	Tên hồ sơ lưu	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Số truyền máu	K.XN	10 năm



QUY TRÌNH DỰ TRÙ VÀ CẤP, PHÁT MÁU KHẨN CẤP

Mã số: XNKT.036

Ngày ban hành: .../.../201...

2	Phiếu chỉ định truyền máu	K.XN	10 năm
---	---------------------------	------	--------

10. Tài liệu tham khảo

- Thông tư số 26/2013/TT-BYT ban hành ngày 16/09/2013 hướng dẫn hoạt động truyền máu



Ngày ban hành: .../.../201....

PHÂN PHỐI

[illegible]

